



Urinprobenahme für die Drogenanalytik

KURZANLEITUNG ZUR PROBENAHME AUS EINEM SAMMELBEHÄLTER


Für die Drogenanalytik wird **mindestens 1 ml Spontanurin** benötigt:

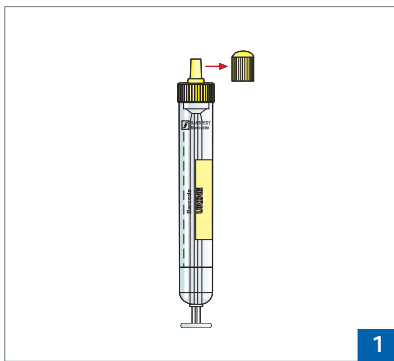


1 Abdeckkappe der Urivette® entfernen und für den Wiederverschluss aufbewahren.

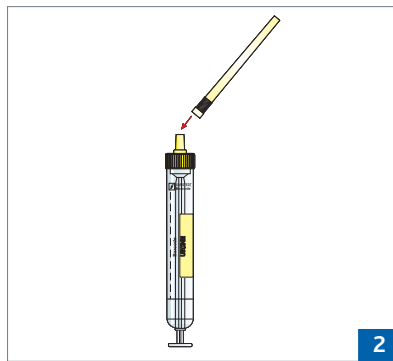

2 Saugschlauch auf die Luerspitze stecken.

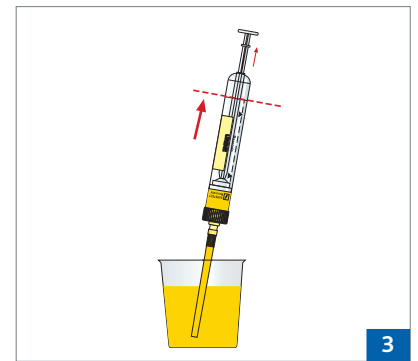


3 Durch Zurückziehen des Kolbens den Urin bis zur Basislinie aufziehen (mind. 1 ml).

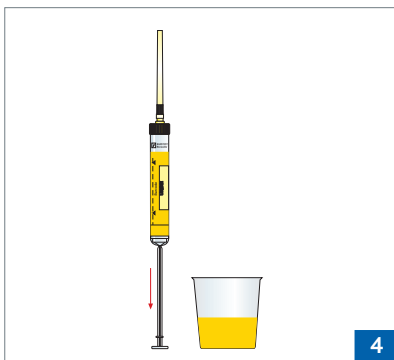

4 Die Urivette® senkrecht halten und die Kolbenstange bis zum Ende aufziehen, um den Saugschlauch zu entleeren.



5 Saugschlauch abziehen, Kolbenstange abknicken und Urivette® mit der Kappe wieder verschließen.

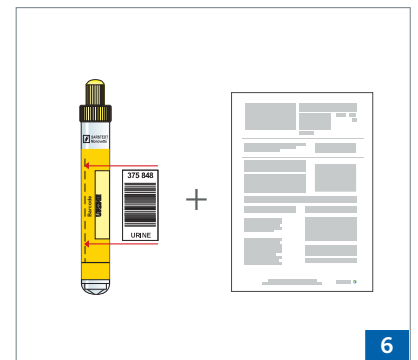



6 Probe mit Barcode kennzeichnen und mit einem ausgefüllten Anforderungsschein an unser Labor senden.

Urivette®-Spezialröhrchen für die Probenentnahme
© SARSTEDT AG & Co.

Materialien für die Urinprobenahme

Diese Materialien können Sie kostenfrei bei uns anfordern.

Abnahmematerial		Hinweise
Urivette mit Saugschlauch, 10 ml		für nativen Urin
Urivette mit Stabilisator und Saugschlauch, 10 ml		zur Stabilisierung der Keimzahl im Urin für ca. 24 h <ul style="list-style-type: none">▪ Für die Analyse von Ethylglucuronid (EtG)▪ Achtung: Nicht geeignet für immunochemische Screenings sowie pH und Sample Check! Wir bitten dafür um zusätzliche Zusendung einer Urivette® ohne Stabilisator.

Haben Sie noch Fragen?

Sprechen Sie uns an!

amedes MVZ für Laboratoriumsdiagnostik und
Mikrobiologie Halle/Leipzig GmbH

Leipziger Chaussee 191f
06112 Halle

Telefon 0345.445 07 100

Telefax 0345.445 07 210

info@amedes-halle-leipzig.de

www.amedes-halle-leipzig.de